

# Sonda crio monouso

N. Parte 2508-P-7022

## Istruzioni per l'uso

Da usarsi solo con l'adattatore Keeler per sonde a gettare (2508-P-8026) e la consolle Cryomatic (2509-P-1000) o con la consolle Cryomatic MKII (2509-P-1010).


**STERILE EO**



## 1 Descrizione

La sonda crio monouso include:

- Gruppo di connessione da inserire nell'adattatore della sonda monouso (fornito separatamente)
- Tubo flessibile per alte pressioni di circa 2 metri di lunghezza
- Corpo della sonda crio

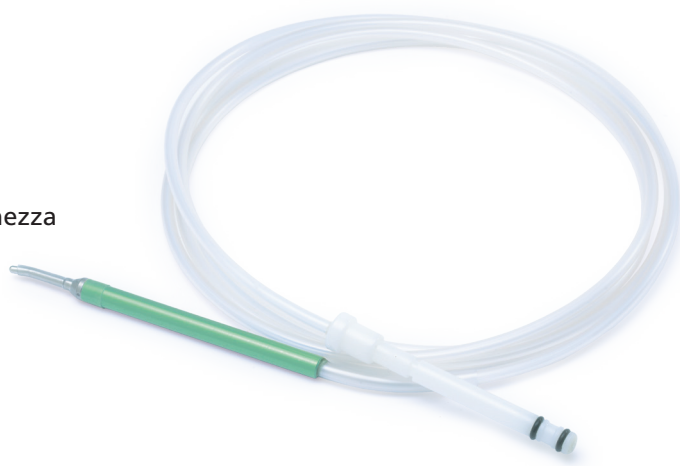

## 2 Avvertenze e precauzioni

- Dispositivo sterile a gettare da usarsi per un solo paziente. Solo monouso
- Non risterilizzare
- Questo dispositivo deve essere utilizzato da personale qualificato esperto nell'uso di apparecchiature chirurgiche oftalmiche
- Non riparare e utilizzare un prodotto danneggiato
- Non utilizzare questo dispositivo se l'imballaggio è in qualche modo rotto o danneggiato
- Non mettere questo dispositivo in una soluzione di sterilizzazione/decontaminazione
- Ai sensi delle leggi federali statunitensi, questo dispositivo può essere venduto soltanto su ordine di un medico
- Fragile. Evitare colpi e maneggiare con cautela
- Non usare oltre la data di scadenza indicata dopo il simbolo sull'etichetta
- Per evitare errori nell'utilizzo, seguire rigorosamente le istruzioni riguardanti sia la sonda crio monouso che l'adattatore
- Usare solo un adattatore Keeler per sonde a gettare (2508-P-8026) o la consolle Cryomatic MKII (2509-P-1010)
- Provare la sonda crio monouso prima di utilizzarla
- Non ostruire i fori di sfiato della sonda monouso (posizionata sul tubo) e della sonda riutilizzabile

## 3 Simboli

**STERILE EO** Sterilizzato con ossido di etilene



Produttore



Attenzione



Il marchio CE indica che questo prodotto è stato testato e risulta conforme alle norme della direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici



Non riutilizzare



Data di scadenza



Codice di partita/Numero di lotto/  
Numero di partita



Consultare le istruzioni per l'uso



Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio e nelle istruzioni indica che questo prodotto è stato immesso sul mercato dopo il mese di agosto del 2005 e che non deve essere trattato come i rifiuti domestici. Solo UE.

Segue a tergo

## 4 Attenzione Importanti informazioni di sicurezza

Se si nota un malfunzionamento, chiudere l'alimentazione di gas e seguire alla lettera le istruzioni per lo scollegamento della sonda crio monouso dall'adattatore/dalla consolle fornite nelle istruzioni per l'uso del sistema Cryomatic e dell'adattatore per sonde monouso. Rimandare la sonda a Keeler per farla esaminare e sostituire.

Prendere una nuova sonda crio monouso e consultare le suddette istruzioni per l'uso.

## 5 Utilizzo con adattatore Keeler Cryomatic

1. Inserire l'adattatore per la sonda crio monouso nell'apposito attacco dell'unità crio. Lasciare o tenere rivolto in su il fermaglio di sicurezza incernierato.
2. Inserire il connettore della sonda crio monouso nell'adattatore. Spingerlo bene a fondo finché non si sente il clic del fermo di bloccaggio a molla.
3. Abbassare il fermaglio di sicurezza per assicurare che blocchi il tubo all'estremità del connettore.
4. Il sistema Keeler Cryomatic eseguirà automaticamente un ciclo di spurgo di 90 secondi.
5. Mettere in funzione l'unità crio seguendo le istruzioni del fabbricante.
6. Provare la sonda crio monouso prima di applicarla all'occhio.
7. Alla fine dell'operazione, eseguire attentamente la procedura di arresto dell'unità crio. Far sfiatare il gas seguendo le istruzioni per lo spurgo dell'apparecchiatura.
8. Per staccare la sonda crio monouso, premere prima il fermo di bloccaggio a molla, quindi sollevare il fermaglio di sicurezza incernierato e staccare il gruppo della sonda usato. Assicurare che sia smaltito in modo sicuro e non venga riutilizzato.



## 6 Modalità d'uso con consolle Keeler Cryomatic MKII

Far riferimento alle istruzioni per l'uso del sistema crio chirurgico Keeler Cryomatic MKII.

Prodotto da 

Keeler Limited, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire SL4 4AA Regno Unito  
Numero verde: 0800 521251 Tel: +44 1753 857177 Fax: +44 1753 827145

Distribuito da

USA Sales Office, Keeler Instruments Inc, 3222 Phoenixville Pike, Building #50, Malvern, PA 19355, USA. Toll Free: 1 800 523 5620 Tel: 1 610 353 4350 Fax: 1 610 353 7814



EP59-41003 Edizione E

**Keeler**